

Knapperne:

Knappen ved pegefingeren = forreste knap (ON)

Knappen under displayet = bagerste knap (OFF)



Passiv test med tragt:

1. Klik på forreste knap
2. Antal dage til næste nøjagtighedstest vises
3. Efter kort tid vises temperatur og batteristatus
4. Når **PAS** blinker, bedes testpersonen blæse i tragten
5. Efter et klik vises resultatet:
 - **POS** = alkohol påvist
 - **NEG** = alkohol ikke påvist
6. En ny testcyklus kan startes ved at holde **forreste knap** inde i nogle sekunder, mens **testresultatet** vises

Direkte test med mundstykke:

1. Klik på forreste knap
2. Antal dage til næste nøjagtighedstest vises
3. Efter kort tid vises temperatur og batteristatus
4. Når **PAS** blinker, holdes forreste knap inde i 3 sekunder
5. Når displayet viser **Blow**, bedes testpersonen blæse i mundstykket
6. Efter et klik vises resultatet efter få sekunder
7. En ny testcyklus kan startes ved at holde **forreste knap** inde i nogle sekunder, mens **testresultatet** vises
8. Skift tilbage til passiv test sker ved at holde forreste knap inde i 3 sekunder, når displayet viser **Blow**

OBS: Resultatet vises i mg/l og skal derfor ganges med 2 for at få promille