

Alco-Sensor FST®**Hurtigreference for statusbeskeder**

Statusbeskeder kan vises med et E eller C

E/C	Besked
06	Overskredet antal prøveforsøg
07	Dårlig kalibrering (ugyldig prøve)
09	Temperatur for kold til den valgte testtype
10	Temperatur for varm til den valgte testtype
11	Mislykket luftblank (brug nyt mundstykke og start testen igen)
12	RFI-detekteringsfaktor
21	Ugyldig prøve
29	Brændselscelle uden for rækkevidde
31	Resultat over rækkevidde
33	Krævet kontrol af nøjagtighed (ACC)
43	Afbrudt test
45	Nøjagtighedskontrol uden for rækkevidde
63	Indstil tid
64-67	Krav til flow/volumen ikke opfyldt (genstart testsekvens)
68	Tidsudløb

Se brugermanualen for yderligere statusbeskeder.